

Instruções de utilização

© 2020 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved.

**Cleaning Solution
CLEANING SOLUTION****REF**

66039 6 x 450 mL

REVISÃO ANUAL

Revisto por	Data	Revisto por	Data

PRINCÍPIO**UTILIZAÇÃO PREVISTA**

Concentrado de limpeza.

REAGENTES**INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO**

Hipoclorito.

AVISOS E PRECAUÇÕES

Tome as precauções normais necessárias para manusear todos os reagentes de laboratório.

Elimine todo o material desperdiçado de acordo com as directrizes locais.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO GHS

Cleaning Solution

PERIGO



H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
EUH031	Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.
P273	Evitar a libertação para o ambiente.
P280	Use luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção ocular/proteção facial.
P301+P330+P331	EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.
P303+P361+P353	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): enxaguar a pele com água.
P305+P351+P338	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P310	Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. hipoclorito de sódio 5 - 10%

SDS

A Ficha de dados de segurança está disponível em techdocs.beckmancoulter.com

PREPARAÇÃO DO REAGENTE

A Cleaning Solution é fornecida pronta para utilização.

Evite a formação de espuma.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DO REAGENTE

Estável até ao prazo de validade indicado no rótulo quando armazenado a uma temperatura de 2 – 8 °C.

Proteger da luz

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

HISTÓRIA DA REVISÃO

Secção GHS revista

Histórico de revisão da versão anterior

Instruções de utilização atualizadas com a inclusão do idioma vietnamita.

Secção «Informações adicionais» atualizada



Beckman Coulter Ireland Inc., Lismeehan, O'Callaghan's Mills Co. Clare, Ireland (001) 703-527-3887
www.beckmancoulter.com

Beckman Coulter do Brasil Com. e Imp. de Prod. de Lab. Ltda,
Alameda Rio Negro, 500, 15º andar, Torre B Alphaville Industrial,
CEP 06.454-00, Barueri, São Paulo, Brasil
CNPJ: 42.160.812/0001-44 Telefone: 0800-771-8818